

NSK

Prophy-Mate **neo**



PRODUCTO PARA HIGIENE ORAL



Para la sonr



Prophy-Mate
neo

isa perfecta



NSK



FLASH pearl

PRODUCTO PARA HIGIENE ORAL



Sistema de Blanqueamiento Dental Funcionamiento Neumático

El nuevo y mejorado Prophy-Mate **neo** combina la forma con la funcionalidad para una mayor facilidad de uso. El excelente equilibrio de su peso y su ligero compartimiento para polvo compacto, lo hacen cómodo de maniobrar, al tiempo que la conexión original de la pieza de mano NSK gira 360°, aún bajo una fuerte presión de aire. Su sencilla operación acorta el tiempo del tratamiento de la placa y las manchas. Puntas disponibles en 60° y 80°.

Aplicaciones

- Remoción de placas y decoloración
- Limpieza
- Preparación del esmalte, dentina y porcelana antes de su colocación final
- Preparación para sellar fisuras y grietas

Ventajas

- Firme y fiable para ahorrar tiempo
- Sencillo de operar
- Fácil mantenimiento
- Conexión rápida a la mayoría de los acoples de turbinas
- Selección de puntas de 60° y 80°



Características



Diseño Ergonómico Cómodo

Su diseño ligero y compacto y su peso bien balanceado facilitan su manejo, minimizando el cansancio de manos y muñecas, garantizando así un tratamiento exhaustivo.




Giro Fácil y Fluido de 360°

Los acoplamientos gemelos rotan fluidamente 360° grados, lo que facilita su funcionamiento, respondiendo flexiblemente a los rápidos movimientos de las puntas de los dedos para ajustar el ángulo de la punta sin requerir el mínimo esfuerzo.



Conexión Sencilla de Un-Solo-Toque

El nuevo Prophy-Mate **neo** está diseñado para conectarse con un solo toque directamente a los acoplamientos de NSK y a otros acoplamientos de las más conocidas marcas de piezas de mano de turbinas de aire.

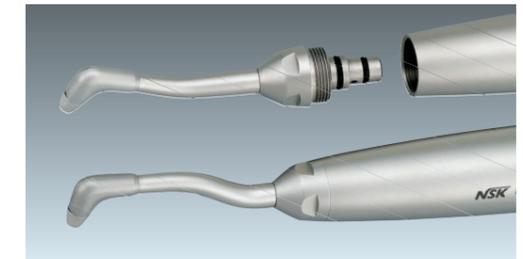


Boquillas Fácilmente Desprendibles con puntas de 60° y 80°

Las puntas seleccionables de 60° y 80° maximizan su capacidad de limpieza. La punta de 60° se adapta excelentemente al área molar y a superficies de difícil acceso y la punta de 80° se utiliza mayormente en los dientes anteriores.



Polvos de Pulido Mejorados

Con las boquillas gemelas originales de NSK se logra una mayor potencia de pulido. Debido a su alta presión, el tiempo de limpieza se reduce significativamente, acortando por lo tanto la duración del tratamiento.

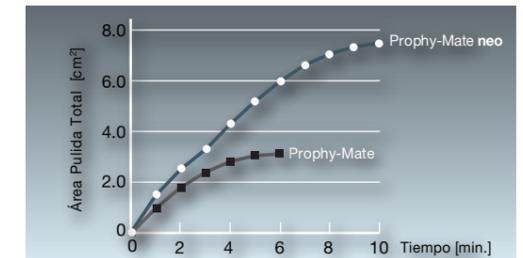

Potencia Estable

Gracias al potente jet de doble boquilla, Prophy-Mate **neo** incorpora una potencia estable de pulido. Se realiza un tratamiento efectivo en base a una potente fuerza pulidora.

Sistema Completo Prophy-Mate neo

TIPO DE ACOPLEMENTO	NSK	KaVo®	Sirona®	W&H®	Bien-Air®	M4	B2
G neo Gris	MODELO: PMNG-PTL-P CÓDIGO DE PEDIDO: Y135-029	PMNG-KV-P Y135-030	PMNG-SR-P Y135-031	PMNG-WH-P Y135-032	PMNG-BA-P Y135-033	PMNG-M4-P Y135-034	PMNG-B2-P Y135-035
	MODELO: PMNW-PTL-P CÓDIGO DE PEDIDO: Y135-036	PMNW-KV-P Y135-037	PMNW-SR-P Y135-038	PMNW-WH-P Y135-039	PMNW-BA-P Y135-040	PMNW-M4-P Y135-041	PMNW-B2-P Y135-042

El Sistema Completo Incluye • Pieza de Mano Prophy-Mate neo con Puntas de 60° y 80° • Escobilla, alambre y lima de limpieza • 5 sobres de 15 g de polvo de limpieza FLASH pearl • Boquilla de reemplazo • Tapa de depósito de polvo • Llave para reemplazo de boquilla



Resultados Resplandecientes Todo el Tiempo

FLASH pearl, un polvo de limpieza utilizado con Prophy-Mate **neo**, es un polvo de partículas esféricas diseñado para rodar delicadamente sobre la superficie de los dientes y penetrar en todas las esquinas para una rápida limpieza. La forma esférica de los granulos del polvo reduce la posibilidad de daño a los dientes y al tejido blando al ir eliminando rápidamente y sin riesgos las manchas y placas. La base de FLASH pearl es calcio de sabor natural, el cual contribuye a un mínimo mantenimiento de Prophy-Mate **neo** ya que no forma masas que bloqueen la boquilla. El polvo también reduce la acidez de los fluidos orales e inhibe el desarrollo bacteriano, al mismo tiempo que disminuye la formación de placas. Este producto es ideal para la limpieza de los dientes de pacientes sensibles al bicarbonato de sodio o aquéllos que sufren de hipertensión.

*Las reacciones adversas a este producto son raras.

- Empacado con estilo en una caja original y práctica
- Contiene 100 sobres de 15 g




- 4 frascos empacados en una caja
- Viene con un envase de medir para su conveniencia
- Cada frasco contiene 300 g

Ventajas


- Potente limpieza • Rápidos resultados
- Suave y Delicado • Sabor natural libre de sodio
- Biodegradable y no obstruyente
- Disponible para sistemas de pulimentos neumáticos de todos los fabricantes.

Los granulos esféricos remueven los residuos de todos los rincones

Los granulos de FLASH pearl son pequeños y de forma esférica comparados con las partículas del polvo de bicarbonato de sodio. Esto se traduce en mayor contacto y mejor acceso para limpiar todas las áreas deseadas de forma efectiva. Un ángulo más amplio de trabajo asegura un tratamiento con menos riesgos.

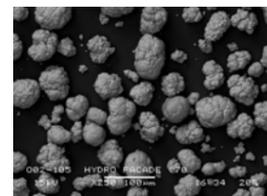


Calcio

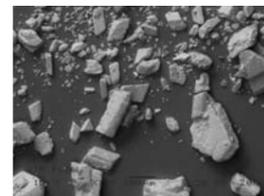


Polvo convencional de Bicarbonato de Sodio

¡Un Nuevo y Efectivo Sistema de Limpieza!

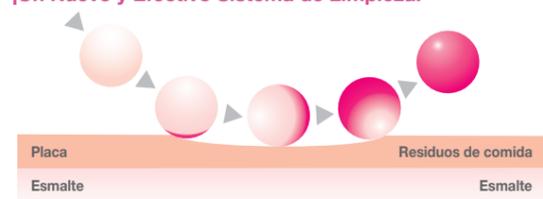


FLASH pearl rueda delicadamente sobre la superficie de los dientes

La forma esférica de FLASH pearl le da un acabado liso a la superficie del diente, a diferencia de los efectos que causan las partículas de bicarbonato de sodio, con bordes más cortantes. FLASH pearl deja los dientes brillantes sin causar daño al esmalte de los dientes.

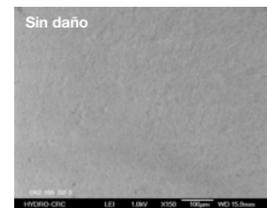


FLASH pearl evita el daño de superficies

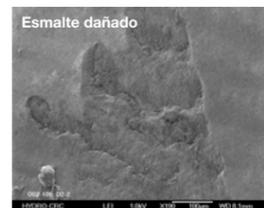


El bicarbonato convencional es agresivo

Fácil Mantenimiento

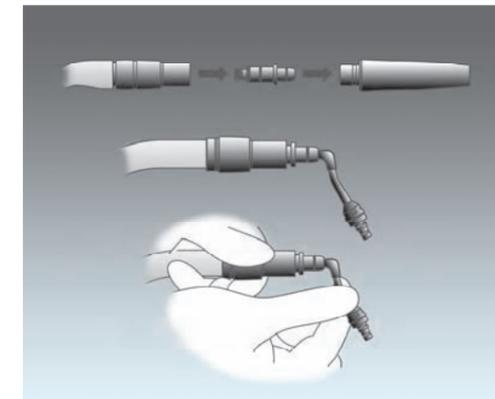

Con una boquilla para soplos, la limpieza puede ser realizada fácilmente y con ella prevenir obstrucciones. Están disponibles boquillas para soplos para todos los modelos de acoples. Se incluyen también cepillos y alambres para limpieza.

Posición Recomendada de la Boquilla

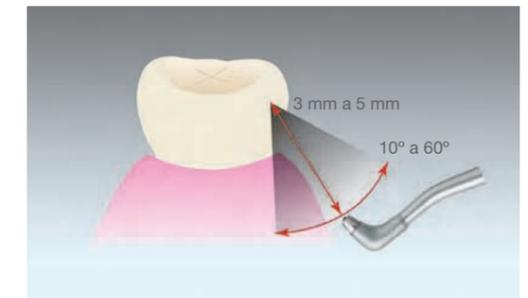

Se puede obtener mayor efectividad de limpieza por la posición de la boquilla en un ángulo entre 10° y 60°, a una distancia de 3-5 mm de la superficie dental. Este ángulo es diferente en comparación a los polvos convencionales existentes en el mercado: el efecto de rodamiento y la adsorción de las partículas esféricas de FLASH pearl es optimizado al mantener la boquilla en ese ángulo. El rociado puede ser aplicado desde la superficie de oclusión hasta el margen cervical del diente.

Repuestos

PMN-HP ■ Pieza de mano con boquilla 60°
 ■ Código de Pedido **T797-010**

Tapa de Depósito de Polvo (neo)
 ■ Código de Pedido **T798-133**

FLASH pearl ■ 100 estuches por envase
 ■ Código de Pedido **Y900-693**

FLASH pearl (Frasco) ■ Envase de 300 g x 4
 ■ Código de Pedido **Y900-698**

Juntas "O" PM ■ Juego de 5
 ■ Código de Pedido **Y900-580**

Juntas "O" PM ■ Juego de 3
 ■ Código de Pedido **Y900-054**

Anillo "O" ■ Boquilla Anterior
 ■ Código de Pedido **0312039 070**

Anillo "O" ■ Boquilla Posterior
 ■ Código de Pedido **0312029 070**

Boquilla 60° (neo)
 ■ Código de Pedido **T797-012**

Boquilla 80° (neo)
 ■ Código de Pedido **T797-013**

Llave de Aro (neo)
 ■ Código de Pedido **T797-601**

Boquilla Soplido PTL (neo)
 ■ Código de Pedido **T798-094**

Junta (neo)
 ■ Código de Pedido **T798-135**

Aceite Lubricante
 ■ Código de Pedido **Z016-112**

Alambre para Limpieza (neo)
 ■ Código de Pedido **T798-090**

Alambre Boquilla (largo) (neo)
 ■ Código de Pedido **T798-095**

Alambre Boquilla (corto) (neo)
 ■ Código de Pedido **T798-091**

Escobilla para Limpieza (neo)
 ■ Código de Pedido **T798-092**

Especificaciones de Prophy-Mate neo

■ **Pieza de mano con boquilla de 80°**
 Longitud: 173,9 mm Peso: 134,9 g

■ **Pieza de mano con boquilla de 60°**
 Longitud: 171,4 mm Peso: 134,8 g

NAKANISHI INC.
 www.nsk-inc.com

700 Shimohinata Kanuma-shi Tochigi 322-8666, Japan
 TEL.: +81 (0)289-64-3380 FAX.: +81 (0)289-62-5636

NSK Europe GmbH
 www.nsk-europe.de

Elly-Beinhorn-Strasse 8 65760 Eschborn, Germany
 TEL.: +49 (0)6196 77606-0 FAX.: +49 (0)6196 77606-29

NSK Dental Spain SA
 www.nsk-spain.es

C/ Módena, 43 El Soho-Európolis 28232 Las Rozas, Madrid, España
 TEL.: +34 91 626 61 28 FAX.: +34 91 626 61 32